

## Simulation de l'application « Humantechnik : Alert »

L'application « **Humantechnik:Alert** » peut être testée sans un récepteur Gateway.

Le serveur du Gateway défile des canaux de test, sur lesquels des signaux d'alerte sont générés de façon aléatoire et sont envoyés 24/7. Ces alertes de test peuvent être affichées sur les smartphones avec une connexion Internet active.

Procédez comme suit:

- Téléchargez l'application Humantechnik : Alert
- Installez l'application selon le mode d'emploi - voir le lien en bas à droite de la page internet du produit.
- Entrez l'un des numéros suivants pour le code et l'ID sur l'écran des paramètres de l'application:

**90** en Code et ID pour le canal de test Lisa

**95** en Code et ID pour le canal test Signolux

Après avoir testé et enregistré la connexion, le smartphone recevra les différentes alertes de test. Une connexion Internet active est nécessaire!

Pour empêcher l'application de recevoir les alertes de test, entrez le numéro **103** pour le code et l'ID dans les paramètres de l'application. Après avoir testé et enregistré, il n'y aura plus d'alertes entrantes (le canal test 103 est muet).

La réception des alertes peut être activée et désactivée à tout moment en entrant les codes de test donnés ci-dessus dans les paramètres.