

Montagehinweise für Tür/Fensterkontakte


Funktionsbeschreibung:

Die Tür/Fensterkontakte bestehen aus 2 Teilen: Dem Schaltteil (zu erkennen an den Anschluss-Schrauben) und dem Betätigungsteil (ohne Anschlüsse). Das Schaltteil enthält einen magnetisch betätigten Kontaktschalter. Das Betätigungsteil enthält einen Magneten, der auf das Schaltteil einwirkt. Sind Schalt- und Betätigungsteil nah beieinander, so ist der Kontakt zwischen den Anschlüssen ganz links und ganz rechts geöffnet. Entfernt sich das Betätigungsteil vom Schaltteil, so wirkt der Magnet nicht mehr auf den Schalter und der Kontakt wird geschlossen. Dieser Zustand wird über ein angeschlossenes Kabel von einem galvanischen Sender Ihrer Humantechnik-Lichtsignalanlage registriert, der Sender wiederum meldet den Empfängern der Lichtsignalanlage einen vorliegenden Alarm.

1. Anschluss der Kontakte an galvanische (direkte) Sender


Drehen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die beiden äußeren Anschluss-Schrauben des Schaltteils um 3 Umdrehungen heraus. Platzieren Sie ein blankes Ende des galvanischen Anschlusskabels unter die Unterlegscheibe der jeweiligen Schraube, sodass beim Zudrehen der Schraube das blanke Ende zwischen Unterlagsscheibe und dem Gehäuse des Schaltteils eingeklemmt wird. Wir empfehlen das Kabel vor der Montage der Kontakte anzuschliessen.

Schaltteil

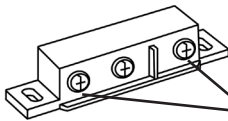

Anschlüsse

Betätigungsteil

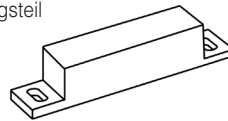

2. Wahl des Montageortes

Wählen Sie den Ort der Montage so aus, dass:


- Das Kabel nicht stört (Stolpergefahr)
- Schaltteil und Betätigungsteil beim Öffnen des zu überwachenden Fensters oder der Tür mindestens 3 cm voneinander entfernt werden.
- Die Gehäuse der Kontaktteile beim Öffnen von Tür oder Fenster nicht gegen andere Gegenstände schlagen

3. Montage

Befestigen Sie zuerst das Schaltteil an einem feststehenden Ort (Tür- oder Fensterrahmen). Dies kann mit Hilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebebandes erfolgen, wir empfehlen jedoch die feste Montage mit Schrauben (durch die seitlichen Befestigungsaugen der Kontaktteile). Befestigen Sie das Betätigungsteil am beweglichen Teil (Tür oder Fenster) in unmittelbarer Nähe des Schaltteils.

Die beiden Kontaktteile sollten im geschlossenen Zustand des Fensters oder der Tür nicht mehr als 8 mm voneinander entfernt sein.

Abstand nicht mehr als 8 mm

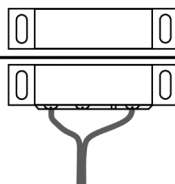

Betätigungsteil an beweglichem Ort

Schaltteil an feststehendem Ort