

VibraLITE 3

Funktionsumfang

Zwei Zeitanzeigen

Digitale Zeitanzeige (wahlweise mit 12- oder 24- Stundenanzeige). Zweite Zeitanzeige kann zum Beispiel bei Reisen innerhalb unterschiedlicher Zeitzonen genutzt werden.

Zwei Alarmzeiten

Wecken oder Erinnern zu den eingestellten Zeiten

Stundenalarm


Kurzes Signal zu jeder vollen Stunde

Stoppuhr

1/100-Sek. Anzeige für Zeitmessungen

Countdown Timer mit Wiederholfunktion

Ideal für wiederkehrende Zeitintervalle (Medizineinnahme, Sport usw.). Maximale Einstellung 23 h 59 Min 59 Sek.

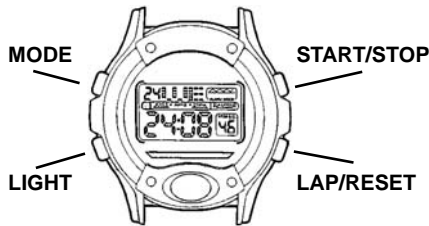

Resetfunktion

Halten Sie die Tasten **MODE**, **START/STOP** und die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Displayanzeige erlischt. Lassen Sie danach die Tasten wieder los. Die Uhrzeit steht auf 12:00 A.M. und die Alarmfunktion, Stundenalarm, Piepton und Vibrationsalarm sind ausgeschaltet. Die Datumsanzeige steht auf dem ersten Januar und im Display steht MO für Montag.

Displayanzeigen

Die **VibraLITE 3** hat sechs unterschiedliche Displayanzeigen

Uhrzeit/
Datumsanzeige



zweite Zeitanzeige



zweite Alarmzeit



Stoppuhr



erste Alarmzeit



Countdown Timer



Durch Drücken der Taste **MODE** kann zwischen den Displayanzeigen umgeschaltet werden. Die Displayanzeigen werden in der oben genannten Reihenfolge umgeschaltet.

Damit Sie mit den 6 unterschiedlichen Displayanzeigen und den dazugehörigen Displaysymbolen vertraut werden, sollten Sie durch Pressen der Taste **Mode** zwischen den Displayanzeigen umschalten.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Stellen Sie sicher, daß im Display die *Uhrzeit/ Datumsanzeige* dargestellt wird. Dies kann gegebenenfalls durch mehrmaliges Drücken der Taste **MODE** erreicht werden.

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt. Durch Drücken der Taste **START/STOP** können die angezeigten Sekunden auf 0 zurückgesetzt werden (00 im Display).

3. Durch Drücken der Taste **MODE** werden nun die Stunden blinkend dargestellt. Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden.

Achtung: Ist der 12-Stundenmodus der **VibraLITE 3** aktiviert, wird am Nachmittag und Abend eine kleines Symbol (PM) im Display dargestellt. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie die Uhrzeit einstellen.

PM-Symbol



4. Um die Minuten der Uhrzeit einzustellen, drücken Sie erneut die Taste **MODE**. Die nun blinkenden Minuten können mit der Taste **START/STOP** eingestellt werden.

5. Ein weiterer Druck auf die Taste **MODE** aktiviert die Einstellung für den 12 bzw. 24 Stundenmodus. Mit der Taste **START/STOP** kann zwischen beiden Einstellungen umgeschaltet werden.

6. Drücken Sie die Taste **MODE**. Im Display wird oben links der Monatstag blinkend angezeigt. Mit der Taste **START/STOP** kann zwischen den Montagen 1 bis 31 umgeschaltet werden.

7. Ein weiterer Druck auf die Taste **MODE** aktiviert die Anzeige für die Monateinstellung. Der betreffende Monat wird mit einer Zahl dargestellt. (1 = Januar, 7 = Juli).

8. Mit einem weiteren Druck auf die Taste **MODE** kann der Wochentag eingestellt werden. Mit der Taste **START/STOP** können die Wochentage eingestellt werden.

9. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** wird der Einstellvorgang beendet.

Der Einstellvorgang kann zu jeder Zeit mit der Taste **LAP/RESET** unterbrochen werden.

Einstellen der Alarmzeit

Das Vorgehen ist für beide Alarmzeiten gleich. Gehen sie wie folgt vor:


1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis die *erste Alarmzeit* bzw. die *zweite Alarmzeit* angezeigt wird (A1 oder A2).

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt. Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden. Wird die **VibraLITE 3** im 12 Stundenmodus betrieben, achten Sie bitte auf das PM-Zeichen im Display.

3. Durch Drücken der Taste **MODE** springt die Anzeige auf blinkende Minuten. Mit der Taste **START/STOP** können die Minuten eingestellt werden.

4. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** wird der Einstellvorgang beendet. Oberhalb der eingestellten Zeit wird das Zeichen **ALM1** oder **ALM2** unterstrichen. Dies bedeutet, daß der Alarm eingeschaltet und somit aktiv ist.

Bitte beachten Sie, daß eine Weckart aktiviert ist (siehe nachfolgenden Punkt Weckart).

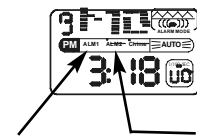

Alarm 1

Alarm 2

Weckalarm Ein-Ausschalten/ Stundensignal

Um den ersten Alarm ein bzw. auszuschalten muß im Display die *erste Alarmzeit* (A1) eingestellt sein. Für den zweiten Alarm muß im Display die *zweite Alarmzeit* (A2) eingestellt sein. Gleichzeitig kann das sogenannte Stundensignal (Chime) ein- und ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis die gewünschte Alarmzeit-Anzeige angezeigt wird.

1. Durch Drücken der Taste **START/STOP** kann zwischen 3 Einstellungen gewählt werden (ALM1, Chime, ALM1 und Chime). Ist zum Beispiel das ALM1- und Chime-Symbol im Display unterstrichen, ist der erste Weckalarm und das Stundensignal aktiv.

Im Gegensatz zum Weckalarm kann das Stundensignal (Chime) bei beiden Alarmzeit-Anzeigen ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Stundensignal (Chime)


Ist das Stundensignal aktiviert, wird zu jeder vollen Stunde die eingestellte Weckart kurz ausgelöst (kurze Vibration und/oder Piepton).

Einstellen der Weckart

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Uhrzeit/ Datumsanzeige* erscheint.

2. Durch Drücken der Taste **START/STOP** kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Vibration eingeschaltet
- Piepton eingeschaltet
- Vibration und Piepton eingeschaltet
- Beide ausgeschaltet

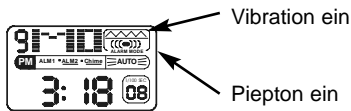

Der Weckalarm stoppt automatisch nach 20 Sekunden.
Durch Druck auf eine beliebige Taste kann der Weckalarm unterbrochen werden.

Anmerkung: Um die Einstellung der Weckart (Vibration, Piepton) zu testen kann die Taste **MODE** gedrückt werden. Bei jedem Druck wird eine kurze Vibration und/oder ein Piepton ausgelöst.

Einstellen des Countdown-Timer

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Countdown Timer -Anzeige* erscheint.

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.

Mit der Taste **START/STOP** können die Sekunden eingestellt werden (0 bis 59).

3. Drücken Sie die Taste **MODE**. Im Display werden die Stunden blinkend angezeigt. Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden (0 - 23).

4. Durch nochmaliges Drücken der Taste **MODE** können nun mit der Taste **START/STOP** die Minuten eingestellt werden (0 bis 59).

5. Drücken Sie die Taste **LAP/RESET** um den Einstellvorgang zu beenden.

Starten des Countdown-Timer

Durch Drücken der Taste **START/STOP** wird der Countdown gestartet.

Durch nochmaliges Drücken der Taste **START/STOP** kann der Countdown unterbrochen werden. Ein unterbrochener Countdown kann durch erneuten Druck der Taste **START/STOP** fortgesetzt werden.

Anmerkung: Ist die Einstellung des Countdown-Timers höher als 10 Minuten, wird bei Erreichen der Werte 10 und 5 Minuten ein kurzer Weckimpuls ausgelöst. Dieser dient zur Erinnerung, daß der Countdown läuft.

Wiederholungsfunktion des Countdown Timers

Wenn der Countdown Timer den Wert "0" erreicht wird der Countdown automatisch wiederholt.

Damit sich der Countdown nicht wiederholt, drücken Sie zweimal die Taste **START/STOP**

Ein unterbrochener Countdown kann durch erneuten Druck der Taste **START/STOP** fortgesetzt werden (*Countdown Timer -Anzeige* muß im Display eingestellt sein).

Stoppuhr Zeitmessung

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die *Stoppuhr -Anzeige* erscheint.

2. Um die Stoppuhr zu starten drücken Sie die Taste **START/STOP**. Oberhalb im Display flackert ein Symbol als Zeichen dafür, daß die Zeitmessung läuft. Um die Zeitmessung zu beenden, drücken Sie erneut auf die Taste **START/STOP**. Ein nochmaliger Druck auf die Taste **START/STOP** setzt die Zeitmessung fort.

Die Zeitmessung der Stoppuhr ist auf 23 Stunden 59 Minuten und 59,99 Sekunden begrenzt.

Um die Stoppuhr auf Null zu stellen beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste **START/STOP** und drücken danach die Taste **LAP/RESET**.

Zwischenzeitmessung

1. Starten Sie die Zeitmessung indem Sie die Taste **START/STOP** drücken.

2. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** kann die Zwischenzeit abgelesen werden. Die Zeitmessung läuft jedoch weiter (erkennbar an dem flackernden Symbol oberhalb im Display).

3. Um wieder zur laufenden Zeitmessung zu schalten, drücken Sie die Taste **LAP/RESET**.

4. Um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen, beenden Sie die Zeitmessung mit der Taste **START/STOP** und drücken Sie die Taste **LAP/RESET**.

Einstellen der zweiten Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste **MODE** so oft, bis im Display die Anzeige für die *zweite Uhrzeit* erscheint.

2. Halten Sie die Taste **LAP/RESET** solange gedrückt, bis die Stunden beginnen zu blinken.

Mit der Taste **START/STOP** können die Stunden eingestellt werden. (Im 12 Stundenmodus beachten Sie bitte das PM-Symbol).

3. Durch Drücken der Taste **LAP/RESET** wird der Vorgang abgeschlossen.

Anmerkung: Bei der zweiten Uhrzeit können nur die Stunden eingestellt werden (Minuten und Sekunden sind gleich wie bei der ersten Uhrzeit).

Displaybeleuchtung

Durch Druck auf die Taste **LIGHT** wird das Display für ca. 3 Sekunden beleuchtet.

Batterie

Ihre **VibraLITE 3** arbeitet mit einer Standard 3 Volt Lithium-Batterie (CR2032). Bitte beachten Sie, daß die Batterielebensdauer sehr stark vom Gebrauch abhängig ist. Wird der Vibrationsalarm bzw. die Displaybeleuchtung übermäßig stark genutzt, wird die Batterielebensdauer sehr stark eingeschränkt.

Achtung

Die Bezeichnung "waterresistant 30 m" hat folgende Bedeutung:

Die Uhr ist lediglich für den alltäglichen Gebrauch geeignet (Duschen, Autowäsche, Wasserspritzer, Schweiß). Für Wassersport ist die Uhr nicht geeignet!