

1. Wie funktioniert er?

Der SmartShaker 2 verwendet eine Kombination aus Bluetooth-Technologie, einstellbarer Vibration und einer anwenderfreundlichen App um Sie nach Ihren Vorlieben zu wecken. Laden Sie die App herunter, koppeln Sie Ihren SmartShaker 2, und stellen Sie Ihre Weckmethode und –Zeit ein. Danach können Sie gemütlich einschlafen, da Sie pünktlich geweckt werden.

2. Kann ich den SmartShaker 2 auch als Normalhörender verwenden?

Der SmartShaker 2 kann von jedem verwendet werden! Wecktöne können frustrierend sein: Durch unangenehmen Ton, die Möglichkeit des Überhörens und die Tatsache, dass dadurch Andere geweckt werden, die gerne weiterschlafen würden.

Daher ist der SmartShaker 2 ideal für Paare und Zimmergenossen mit unterschiedlichen Tagesabläufen. Wollten Sie jemals geweckt werden ohne dabei den Partner zu stören? Mit dem SmartShaker 2 ist dieses Problem gelöst.

3. Wie genau ist der SmartShaker 2?

Der SmartShaker 2 ist so genau wie Sie ihn einstellen. Bedenken Sie dass Sie viele Möglichkeiten der Einstellung haben – seine Weckkraft ist eine Frage Ihrer vorgenommenen Einstellungen.

4. Wie sicher ist der SmartShaker 2?

Der SmartShaker 2 entspricht völlig den gängigen Sicherheitsbestimmungen der Industrie. Sich durch ihn wecken zu lassen ist absolut unbedenklich.

5. Gibt es eine Bedienungsanleitung?

Alle SmartShaker 2 werden mit einer Kurzanleitung ausgeliefert. Nach Installation der App werden Sie in die Bedienung des Gerätes eingeführt. Weitere Information ist ebenfalls über die *SmartShaker Plus* App zugänglich.

6. Wie schalte ich ihn ein?

Der SmartShaker 2 ist mit einem einfachen Schiebeschalter auf der Seite ausgestattet.

7. Wie koppele ich ihn?

So koppeln Sie Ihren SmartShaker 2:

- Rufen Sie die *SmartShaker+ (Plus)* App auf.
- Schalten Sie den SmartShaker 2 ein (Grüner Rand am Schalter sichtbar).
- Wählen Sie das Menu-Symbol in der oberen rechten Ecke auf.
- Wählen Sie "Meine Geräte" aus, dann "Hinzufügen".
- Wählen Sie den SmartShaker 2 aus.
- Halten Sie die Snoozetaste des SmartShaker 2 gedrückt, bis das Gerät kurz vibriert.
- Wählen Sie Ihren Smartshaker 2 von der Liste der verfügbaren Geräte aus und tippen Sie auf "hinzufügen".
- Wählen Sie "Schliessen", dann "Fertig"

8. Wieso ist mein Weckton verzerrt?

Der Ton kann sich bei leerwerdendem Akku verzerren. Laden Sie Ihren SmartShaker2 neu auf.

9. Was zeigt die Status-LED des SmartShaker2 an?

LED grün, schnelles Blinken: - Bluetooth-Suche / Smartphone ist ausserhalb der Reichweite

LED grün, langsames Blinken: In Synchronisation / gekoppelt (LED schaltet sich nach erfolgter Synchronisation aus)

LED grün, schnelles Blinken: - Der Alarm ertönt

LED rot, blinkt: Akku-Ladestand ist niedrig

LED rot, Dauerlicht: Wird geladen

LED grün, Dauerlicht: Aufladung abgeschlossen (Akku voll)

10. Was passiert falls mein Smartphone ausser Reichweite oder ausgeschaltet ist?

Der SmartShaker 2 läuft unabhängig vom Smartphone weiter, nachdem das Weckprogramm synchronisiert wurde. Selbst wenn Ihr Telefon im Flugmodus, ausser Reichweite oder gar ausgeschaltet ist, wird der SmartShaker2 dennoch Sie gemäß Ihrer Einstellung wecken.

11. Warum ist der SmartShaker 2 nicht stets mit meinem Telefon gekoppelt?

Aus Energiespargründen geht der SmartShaker 2 nach 5 Minuten des Nichtgebrauchs in Ruhestellung. Das eingestellte Weckprogramm läuft natürlich dabei weiter. Drücken Sie für eine neue Ankopplung einfach die Snoozetaste 3 Sekunden lang um das Gerät wieder aufzuwecken.

12. Wie wird der SmartShaker 2 geladen?

Der Smartshaker 2 verwendet ein Standard-Micro-USB zu USB Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) welches an jedes DC 5V 500mA (oder höher) USB-Ladegerät oder einen freien USB-Steckplatz Ihres Rechners angeschlossen werden kann.

13. Wie lange hält der Akku?

Der SmartShaker 2 hat eine ziemlich hohe Kapazität, so dass eine neue Ladung zum Teil erst nach 7 - 10 Tagen notwendig wird.

14. Woran kann ich den Batteriestand erkennen?

Die App zeigt bei gekoppeltem Gerät den genauen Batteriestatus an.

15. Wann muss ich den SmartShaker 2 wieder aufladen?

Eine rot blinkende LED zeigt Ihnen dass es Zeit für eine Aufladung wird.

16. Wo platziere ich den SmartShaker 2 am Besten?

Der SmartShaker 2 wurde für eine Anwendung unter dem Kopfkissen konzipiert. Als Weckmethoden verfügt er über laute Wecktöne und kräftige Vibration. Der SmartShaker 2 ist klein und leicht, Sie werden ihn während des Schlafens nicht spüren – ausser sein Alarm fängt an.

17. Kann ich mein iPad mit der SmartShaker Plus App verwenden?

Ja. Obwohl die App für das iPhone gedacht ist, können Sie dennoch Ihr iPad damit verwenden.

Stellen Sie die App-Suche von 'nur iPad' auf 'nur iPhone'.
eine eigen App für das iPad ist in Entwicklung.