

# Kurzanleitung LA-90 Set

## Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vorhanden sind :

- «LA-90»
- 1 Akku
- 1 Stecker-Netzteil
- 1 Schwarze Einlage
- 4 GummifüÙe
- 1 Mikrofonsockel
- 1 Mikrofonhals
- 1 XLR-Buchsenkabel zu 3,5 mm Klinkenstecker
- 1 Hörer
- 1 Spiralkabel RJ zu 3,5 mm Klinkenstecker
- 1 Bedienungsanleitung LA-90 + Kurzanleitung LA-90 Set
- 1 Garantiekarte

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

## Vorbereitung

### Akku einsetzen

(Seite 3 der Bedienungsanleitung)

### 1. Tischmikrofon:



Stecken Sie den Mikrofonhals in den Anschluss des Mikrofonsockels. Die Verriegelung soll dabei einrasten. Schliessen Sie das XLR-Buchsenkabel an der Rückseite des Mikrofonsockels an.

### 2. Hörer

Stecken sie die transparente RJ-Verbindung des Spiralkabels in die Anschlussbuchse des Hörers. Der Hörer kann auf der Haltenase des schwarzen Blendenstreifens eingehängt werden.

### 3. Anschluss des Mikrofons und des Hörers an das LA-90

Schließen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Mikrofons an den Mikrofoneingang des LA-90. **Wichtig:** Stellen Sie den Mikrofonwahlschalter auf die untere Stellung. Bei Nichtbeachtung können bei der Anwendung unangenehme Rückkopplungen (laut pfeifende Geräusche) auftreten! Schliessen Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Hörer-Spiralkabels an die Kopfhörerbuchse des LA-90 an.

### 4. Stromversorgung

Verbinden sie das Kabel des Stecker-Netzteils mit der Stromversorgungsbuchse des LA-90. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

## Inbetriebnahme

Drücken Sie den Knopf «I» um das Gerät einzuschalten («O» zum Ausschalten).

Stellen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons mit dem Drehreglerknopf oberhalb des Mikrofonanschlusses ein.

Stellen Sie die Lautstärke des Hörers mit dem Drehreglerknopf oberhalb des Kopfhöreranschlusses ein.

Bemerkung : Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Einschaltkontrollleuchte grün sowie die Kontrollleuchte auf der Vorderseite blau. Das Tischmikrofon und der Hörer sind somit betriebsbereit.



LA-90 mit schwarzem Blendenstreifen

Tischmikrofon




Hörer

Spiralkabel RJ / 3,5 mm Klinke



XLR-Buchsenkabel / 3,5 mm Klinke

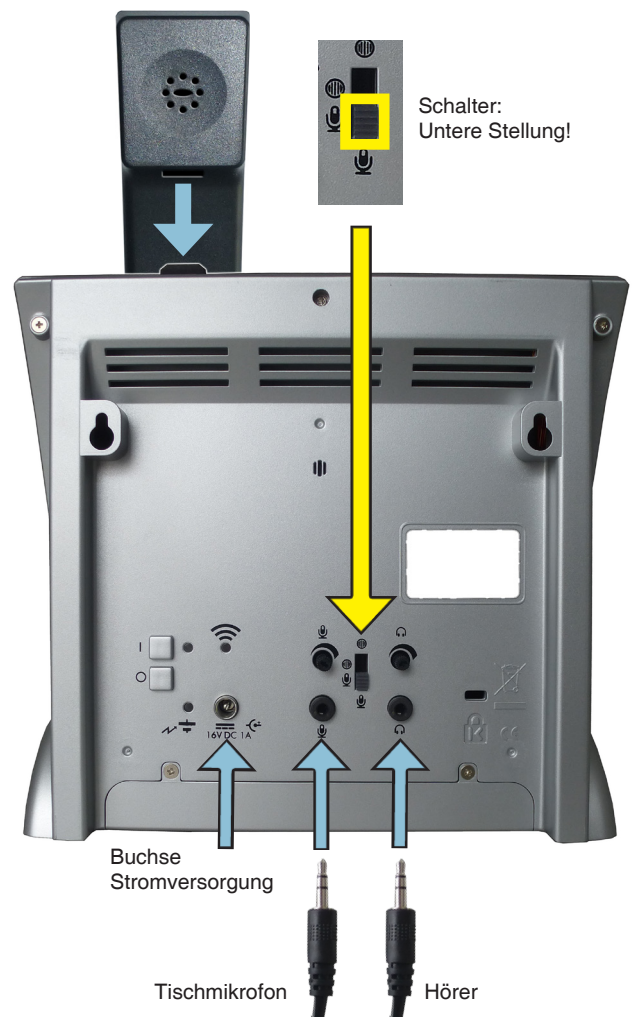

Schalter: Untere Stellung!

Buchse Stromversorgung

Tischmikrofon

Hörer