

Notrufnummer speichern (Seite 35)








 1. Drücken bis [System]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Notruf/SOS] erscheint	 4. Bestätigen und PIN 1590 eingeben
 5. Bestätigen – [SOS-Modus] wird angezeigt	 6. [Nummer] auswählen	 7. 2 x bestätigen	8. Nummer eingeben
 9. Bestätigen	10. Gewünschte Position eingeben	 11. Bestätigen	

Notrufansage aufnehmen (Seite 37)

 1. Drücken bis [System]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Notruf/SOS] erscheint	 4. Bestätigen und PIN 1590 eingeben
 5. Bestätigen – [SOS-Modus] wird angezeigt	 6. [Ansage] auswählen	 7. Bestätigen – [Aufnehmen] erscheint	 8. Bestätigen – Text sprechen
 9. Drücken zum Beenden (Text wird abgespielt)			

Einschalten / Ausschalten der Notruf-Funktion (Seite 38)


Achtung: vor dem Einstellen der Notruf-Funktion muss eine Notruf-Nummer eingegeben und eine Notruf-Ansage aufgesprochen werden.

 1. Drücken bis [System]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Notruf/SOS] erscheint	 4. Bestätigen und PIN 1590 eingeben
 5. Bestätigen – [SOS-Modus] wird angezeigt	 6. [SOS-Modus] bestätigen	 7. [Eing] oder [Ausg] auswählen	 8. Bestätigen







Kurz-Bedienungsanleitung

freeTEL II







Einstellung der Hörerlautstärke (Seite 14 der ausführlichen Bedienungsanleitung)

 Drücken während des Gesprächs	Info: In 5 Stufen um je 4 dB Erhöhung möglich
--	---





Einstellung der Hörerlautstärke - Verstärkung (Seite 14/15)

 Drücken – Taste leuchtet rot = zusätzliche Verstärkung an	 Drücken – Taste leuchtet nicht = zusätzliche Verstärkung aus		
 Schiebeschalter	 maximale Verstärkung	 halbe Verstärkung	 Verstärkung Hi und Lo hoher und tiefer Töne bis maximal 10 dB

Klingellautstärke des Mobilteils einstellen (Seite 29/30)

 1. Drücken bis [Klingelton]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Volume]	 4. Bestätigen
 5. Drücken und Lautstärke wählen	 6. Bestätigen		

Melodie des Mobilteils einstellen (Seite 29/30)

 Drücken bis [Klingelton]	 2 x bestätigen [Melodie] erscheint	 Drücken und eine von 8 Melodien auswählen	 Bestätigen
--	--	--	---

Tastensperre (Seite 12)

 Drücken und halten bis [Sperren] erscheint	 Bestätigen – Tasten sind gesperrt	 Drücken und halten bis [Freigabe] erscheint	 Bestätigen – Tasten sind entsperrt
--	--	---	---

Wahlwiederholung (Seite 13)

 Drücken bis zu einer der zuletzt gewählten Rufnummer	 Wählen
---	---

Benutzung des Telefonbuches

Name / Telefonnummer speichern (Seite 16)

 1. Drücken bis [TelBuch]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Neu]	 4. Bestätigen und Name über Zifferntastatur eingeben
 5. Bestätigen und Tel.-Nr. inkl. Vorwahl eingeben	 6. Bestätigen – Anzeige [Neu] erscheint	 7. Drücken für weitere Einträge	C 8. Menüpunkt verlassen

Anrufen aus dem Telefonbuch (Seite 18)

 1. Drücken bis [TelBuch]	 2. Bestätigen	 3. Drücken und [Suchen] auswählen	 4. Bestätigen
 5. Name/Tel.-Nr. auswählen	 6. Anrufen...	oder...	C 7. Suchvorgang abbrechen

Name / Tel.-Nr. eines Telefonbucheintrages ändern (Seite 19)

 1. Drücken bis [TelBuch]	 2. Bestätigen – [Suchen] erscheint	 3. Bestätigen	 4. Drücken und Name auswählen
 5. Bestätigen – [Ändern] erscheint	 6. Bestätigen und ändern	C 7. Drücken zum Löschen eines Buchstabens	 8. Drücken – Änderungen gespeichert
9. Die zu ändernde Nummer erscheint im Display	C 10. Drücken zum Löschen einer Ziffer	 11. Drücken – Änderungen gespeichert	

Telefonbucheintrag löschen (Seite 19)

 1. Drücken bis [TelBuch]	 2. Bestätigen – [Suchen] erscheint	 3. Bestätigen	 4. Drücken und Name auswählen
 5. Bestätigen	C 6. Drücken bis [Löschen] erscheint	 7. Bestätigen – [OK] erscheint	 8. Drücken – Eintrag gelöscht

Anrufbeantworter

Einstellung Tag / Zeit (Seite 23)

 1. Drücken bis [AB Einst]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Datum/Zeit]	 4. Bestätigen – Tag-Anzeige blinkt – Tag eingeben (1 = Mo, 2 = Di ...)
 5. Drücken – linke Stelle Uhrzeit blinkt	6. Nach jeder eingegebenen Ziffer drücken	 7. Bestätigen	8. Bestätigungssignal erscheint

Aufnehmen einer Ansage (Seite 24)

 1. Drücken bis [AB Einst]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [AB Ansage]	 4. Bestätigen und Ansage auswählen
 5. Bestätigen – [Aufnehmen] erscheint	 6. Bestätigen – Text sprechen	6 7. Drücken zum Beenden (Text wird abgespielt)	Info: Ansprache 1: AW 2 Rufe AW 6 Rufe Ansprache 2: Nur Ansage

Funktionen des Anrufbeantworters (AB) einstellen (Seite 26)

Achtung: vor dem Einstellen des Anrufbeantworters muss eine Ansage aufgesprochen werden!

 1. Drücken bis [AB Einst]	 2. Bestätigen	 3. Drücken bis [Funktionen]	 4. Bestätigen
 5. Drücken und gewünschte Einstellung auswählen	 6. Drücken – Einstellungen gespeichert	Info: Einstellung = AB Aus, Nur Ansage, AW 2 Rufe, AW 6 Rufe	

Eine aufgezeichnete Nachricht abspielen (Seite 27)

 1. Drücken bis [AB Nachr]	 2. Bestätigen – [Abspielen] wird angezeigt	 3. Nochmals drücken, Anzahl der Nachrichten wird angezeigt	 4. Bestätigen
2 5. Drücken zum Unterbrechen [Pause] erscheint	2 6. Nochmals drücken = Abspielen wird fortgesetzt	1 7. 2 x drücken, vorhergehende Nachrichten starten	3 8. 1 x drücken = nächste Nachricht
4 9. 1 x drücken zum Nachrichten löschen	6 10. 1 x drücken zum Beenden		