

CM-2.4

Système de communication personnel




« CM-2.4 », la connexion directe entre la parole et la compréhension.

« CM-2.4 » augmente les limites d'intelligibilité – un gain net pour les utilisateurs de systèmes auditifs et tous ceux qui souhaitent converser en confiance dans des environnements bruyants.



HUMANTECHNIK –
SMS Audio Electronique
vos partenaires pour les
accessoires audiolgiques

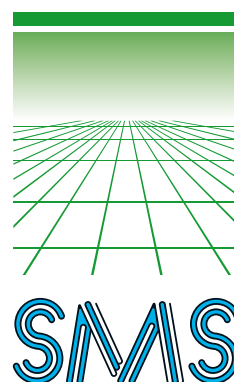



Toujours à l'écoute : lors d'événements, au travail et à d'autres endroits bruyants



Le « CM2.4-Set » est livré dans une pochette souple, en plus de l'émetteur et du récepteur CM-2.4, sont inclus 1 micro enfichable, 1 set d'écouteurs, 1 casque d'écoute, 1 collier magnétique, 2 clips ceinture, 2 dragonnes tour du cou, 1 alimentation et une station de charge pour deux postes.

En transmettant numériquement des signaux audio sur la bande de fréquence 2.4 GHz, l'amplificateur de communication « CM-2.4 » utilise la méthode la plus performante en technologie de transmission radio. Le résultat : un son cristallin d'une qualité nettement plus élevée par rapport aux systèmes de transmission quotidiens.

Dans sa conception discrète et élégante, le « CM-2.4 » contient une technologie qui vous impressionnera par la qualité de sa transmission et de l'intelligibilité de la parole, dès que vous l'utilisez. Le « CM-2.4 » est spécialement conçu comme aide à la communication, même dans des situations acoustiques difficiles.

Facile à utiliser et avec une large gamme d'applications possibles

Le système de communication personnel « CM-2.4 » est composé d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur, qui est équipé par défaut d'un micro enfichable, offre d'autres possibilités de connexion.

Le récepteur permet également différentes possibilités de connexion pour des accessoires d'écoute. Inclus dans l'ensemble sont des écouteurs, un casque d'écoute léger et un collier magnétique.

Ce dernier permet une transmission par induction entre le récepteur et des implants cochléaires ou des aides auditives avec une bobine d'induction activée.

Excellentes performances et manipulation facile

Les fonctionnalités confortables de ce système assurent une utilisation simple et facile permettant d'éviter les erreurs de manipulation. Après la mise en route, les appareils sont immédiatement prêts à l'emploi. Les réglages et les paramètres du menu peuvent être modifiés à l'aide de 3 boutons et l'écran LCD affiche l'état actuel.

Passer en mode compréhension

S'il est nécessaire de comprendre chaque mot même dans des environnements bruyants, par exemple au travail, dans vos loisirs ou dans un restaurant animé, le « CM-2.4 » vous permet de participer immédiatement aux conversations en toute confiance grâce à une compréhension claire.

Spécifications techniques
Dimensions : 85 x 50 x 15 mm (H x L x P)
Poids : 66 g
Type de fréquence : ISM 2403 - 2480 MHz
Type de transmission : Modulation avec saut de fréquence ISM 2.4 GHz FSK
Sensibilité du récepteur : -95dBm
Puissance d'émission : Maximum 10 mW
Temporisation : < 30 ms
Distance canal : 1MHz
Débit de transfert des données : 2 Mbps
Alim. électrique : LI-ION 3,7 V / 1100 mAh
Durée d'utilisation : En moyenne 20h / charge
Portée : Jusqu'à 300 m